

# Příbalová informace

## CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky

(ID82602)

### CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky

Čtěte pozorně a uchovejte příbalovou informaci pro potřebu použití v budoucnu, budete-li mít problémy.

### SLOŽENÍ A POPIS

Přípravek **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky** je sterilní pufrovaný izotonický vodný roztok, obsahující citrátový a borátový pufr, chlorid sodný, edetan disodný 0,05% a POLYQUAD® (chlorid polidronia) 0,001% jako konzervační látku a PEG-11 laurylether kyseliny karboxylové a TETRONIC\* 1304.

### CHARAKTERISTIKA

Přípravek **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky** zvlhčuje kontaktní čočky, odstraňuje nepříjemné pocity spojené s jejich nošením a napomáhá k odstranění nežádoucích částic, které způsobují podráždění oka a/nebo jiné nepříjemné pocity. Přípravek **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky** zabraňuje tvorbě bílkovinných usazenin na povrchu kontaktních čoček, pokud je použit čtyřikrát denně.

### TERAPEUTICKÉ INDIKACE (Použití)

Přípravek **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky** se může používat pro denní zvlhčování měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček k jednodennímu či vícedennímu nošení a kontaktních čoček k jednorázovému použití, k dennímu zvlhčování silikon akrylátových a fluorosilikon akrylátových tvrdých a plynopropustných kontaktních čoček s následujícím doporučením:

- Pro zvlhčování kontaktních čoček dle potřeby v průběhu dne pro odstranění nepříjemných pocitů.
- Pro zvlhčování kontaktních čoček s prodlouženou dobou nošení před spánkem a po probuzení.

### KONTRAINDIKACE (Důvod nepoužívat)

Přípravek by neměli používat nositelé kontaktních čoček přecitlivělí na kteroukoliv složku v přípravku **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky**.

### DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Přípravek **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky** se může používat po celý den pro zlepšení pohodlí nošení kontaktních čoček.

**PRO OSVĚŽNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK:** Pociťujete-li při nošení čoček mírné podráždění, nepříjemné pocity nebo je-li Vaše vidění zastřené, kápněte do každého oka 2 kapky přípravku a 2 – 3 krát mrkněte.

**PRO ZAMEZENÍ USAZOVÁNÍ BÍLKOVIN NA POVRCHU KONTAKTNÍCH ČOČEK:** Kápněte do každého oka 2 kapky přípravku a 2 – 3 krát mrkněte. Pro zamezení tvorby bílkovinných usazenin a nežádoucích částic na povrchu čoček provádějte tento postup až čtyřikrát denně.

### VAROVÁNÍ

Pro správnou péči o Vaše kontaktní čočky a správné používání přípravků určených k péči o čočky je důležité, abyste dodržovali pokyny svého očního lékaře a veškeré pokyny uvedené v příbalových letácích, včetně pokynů týkajících se pouzdra na čočky. Pokud pociťujete trvale nepříjemné pocity nebo dochází-li k nadměrnému slzení či změnám vidění při nasazených kontaktních čočkách nebo jsou-li Vaše oči zarudlé, IHNED čočky vyjměte a kontaktujte se s Vaším očním specialistou.

### UPOZORNĚNÍ

Hrotem kapátka lahvičky se nikdy ničeho nedotýkejte, aby se zamezilo znečištění přípravku.

Po použití nasadte na lahvičku opět uzávěr.

Uchovávejte při pokojové teplotě.

V intervalech mezi používáním přípravku udržujte lahvičku pevně uzavřenou.

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obale : (EXP)

Zlikvidujte 6 měsíců po prvním otevření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

### BALENÍ

Přípravek **CLENS-100® Kapky na kontaktní čočky** je sterilizován filtrací a dodává se v plastických lahvičkách ve velikostech 10 ml.

### DISTRIBUTOR

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., Sokolovská 77 – 79, Praha 8, 186 00, IČO: 26427389

### VÝROBCE

Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX USA 76134-2099

### ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU

Alcon Laboratories, (U.K.) Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7UD Velká Británie