

OPTI-FREE® EXPRESS® víceúčelový dezinfekční roztok BEZ MNUTÍ TRVALÉ POHODLÍ

CHARAKTERISTIKA:

OPTI-FREE® EXPRESS® víceúčelový dezinfekční roztok obsahuje POLYQUAD® a ALDOX® jako aktivní složky, které ničí škodlivé mikroorganismy, ale zároveň jsou dostatečně šetrné k oku. Obsahuje také citrát sodný, který odstraňuje během uchovávání bílkovinné usazeniny z povrchu kontaktních čoček.

OPTI-FREE® EXPRESS® poskytuje trvalé pohodlí pro celodenní nošení kontaktních čoček, dokonce i u citlivých očí.

OPTI-FREE® EXPRESS® zvlhčuje čočky a uleví při menších podrážděních a nepohodlí, které se mohou vyskytnout během nošení. S roztokem **OPTI-FREE® EXPRESS®** se nepoužívá žádný jiný fyziologický roztok.

OPTI-FREE® EXPRESS® se používá k dezinfekci, čištění, oplachování, zvlhčování a uchovávání všech druhů měkkých kontaktních čoček, včetně silikon hydrogelových.

SLOŽENÍ:

OPTI-FREE® EXPRESS® je sterilní pufrovaný izotonický vodný roztok, obsahující chlorid sodný, sorbitol, edetan disodný, kyselinu boritou, aminomethylpropanol, citrát sodný a poloxamin jako čistící složky, POLYQUAD® (polidroniumchlorid) 0,001% a ALDOX (myristamidopropyl dimethylamin) 0,0005%.

KONTRAINDIKACE (Důvod, proč nepoužívat):

Při precitlivělosti na některou ze složek přípravku by **OPTI-FREE® EXPRESS®** neměl být používán.

VŠEOBECNÉ INSTRUKCE:

- Před každou manipulací s kontaktními čočkami si vždy důkladně umyjte a opláchněte ruce. Vždy manipulujte se stejnou čočkou, pravou nebo levou, abyste předešli záměně.
- Pokud použijete nové ALCON® pouzdro na čočky, vypláchněte jej před použitím roztokem **OPTI-FREE® EXPRESS®**.
- Po použití pouzdro vyprázdněte, vypláchněte roztokem **OPTI-FREE® EXPRESS®** a nechte vyschnout na suchém vzduchu. Alcon doporučuje měnit pouzdro tak často, jak je to možné.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCI A ODSTRANĚNÍ BÍLKOVINNÝCH USAZENIN:

Opláchněte důkladně každou stranu čočky roztokem **OPTI-FREE® EXPRESS®**. Naplňte ALCON® pouzdro na čočky dostatečným množstvím čerstvého roztoku **OPTI-FREE® EXPRESS®**, aby byly čočky ponořeny. Umístěte čočky do pouzdra a pevně jej uzavřete. Nechte čočky v uzavřeném pouzdře přes noc, nejméně však 6 hodin. Před nasazením opět důkladně opláchněte každou stranu čočky tímto roztokem, abyste odstranili veškeré usazeniny.

Váš oční specialista Vám může doporučit používání dalších přípravků nebo postupů v péči o čočky na základě vlastností slz a plánovaného systému nošení čoček. Vždy dodržujte všechna doporučení Vašeho očního specialisty.

Čočky můžete uchovávat v uzavřeném pouzdře po dobu 30 dní. Pokud je nepoužíváte delší dobu, musíte je každých 30 dnů a před nasazením znovu očistit a dezinfikovat.

ZVLHČOVÁNÍ:

Pokud během nošení kontaktních čoček pocítíte podráždění, nepohodlí nebo se objeví rozmazané vidění, vkápněte jednu nebo dvě kapky roztoku **OPTI-FREE® EXPRESS®** do oka a dvakrát nebo třikrát mrkněte. **OPTI-FREE® EXPRESS®** můžete takto použít kdykoli dle potřeby během dne.

VAROVÁNÍ:

Je důležité, abyste důsledně dbali rad svého očního lékaře a všech instrukcí uvedených v příbalové informaci pro správné používání a péči o Vaše čočky a přípravky, včetně pouzdra. Jestliže se u Vás objeví přetrvávající pocit nepohodlí, nadměrné slzení, změny vidění nebo zčervenání oka, OKAMŽITĚ vyjměte čočky z oka a navštivte svého očního lékaře, aby se potíže více nezhoršily.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte vždy čerstvý roztok **OPTI-FREE® EXPRESS®**. Nikdy nepoužívejte roztok již jednou použitý.
- Vždy používejte ALCON® pouzdro na čočky.
- Aby nedošlo ke kontaminaci obsahu, nedotýkejte se ničím ústí kapací láhve.
- Po každém použití láhev dobře uzavřete.
- Uchovávejte při pokojové teplotě. Nevystavujte extrémním teplotám.
- Pokud roztok nepoužíváte, nechte láhev vždy dobře uzavřenou.
- Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu.
- Nepoužívejte déle než 6 měsíců po prvním otevření láhve.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Rostok není určen k použití při tepelné sterilizaci.

BALENÍ:

OPTI-FREE® EXPRESS® je sterilizován filtrací a dodává se v umělohmotných láhvích ve velikosti od 60 ml do 470 ml.

DISTRIBUTOR:

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Sokolovská 77-79
186 00 Praha 8
IČO: 26427389

VÝROBCE:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Velká Británie

CE 0123

© 2002,2005 Alcon Laboratories, Inc.